



CSD

МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Призначення для використання:

для забору людської ДНК зі зразків слини.


Вміст: набір містить розчин-стабілізатор.

Обережно! Промити водою, якщо розчин потрапив в очі або на шкіру.
Не вживати розчин!

Зберігати: 15°C- 30°C

Перед забором: за 30 хв. до забору слини не вживати їжу та напої, не курити та не жувати жувальну гумку.

Не знімати поліетиленову плівку з кришки.

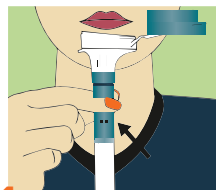


1

Сплюньте у воронку приймальної пробірки поки слина не досягне відповідної позначки (без бульбашок).




2

Тримайте пробірку вертикально однією рукою. Іншою рукою закрийте воронку кришкою, як це показано на малюнку 2 поки не почуєте клацання.

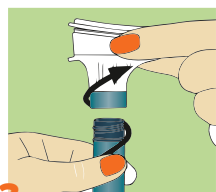


3

Розчин з кришки повинен витікати в пробірку, щоб змішатися зі слиною. Перевірте щоб кришка була міцно закрита.

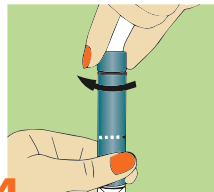

4

Використайте маленьку кришечку, щоб закрити пробірку без воронки.

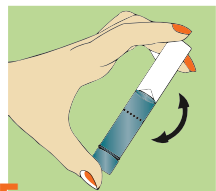

5

Перемішайте вміст пробірки 5 секунд, як зображено на малюнку 5. Воронку утилізуйте.